

Gebruiksaanwijzing voor de aankleedtafel 2.0

Inhoudsopgave

Voorwoord.....	3
Doel van de gebruikershandleiding	3
Belangrijke informatie	3
Inleiding.....	4
Omschrijving.....	4
Beoogd gebruik van het product.....	5
Wijzigingen aan het product	5
Productspecificaties	5
Gebruiksomstandigheden	5
Afbeeldingen van het product.....	6
Eisen aan de (werk)plek of omgeving waar het product wordt gebruikt	6
Veiligheid.....	6
Veiligheidsrisico's bij verkeerd gebruik.....	6
Reparaties aan de aankleedtafel 2.0 mogen niet door de gebruiker worden uitgevoerd.....	6
Veiligheidsvoorzieningen.....	6
Veiligheidsaanwijzingen	7
Transport en opslag	8
Transport.....	8
Opslagcondities.....	8
Methoden die voorkomen dat het product schade oploopt.....	8
Montage en installatie wandmodel aankleedtafel.....	8
Plaatsen	8
Voorwaarden voor montage en bevestiging	8
In bedrijf stellen van de aankleedtafel	9
Verwijderen van beschermingsvoorzieningen	9
Procedures	9
Bediening	9
Radiofrequentie-technologische afstandsbediening	9
Instructie herstellen blokkering	9
Onderhoud	10
Storingen.....	10
Garantie	11
Milieuvoorschriften	11

Einde levenscyclus	11
Afkoppelen van energiebronnen.....	11
Bijlage I (gegevens fabrikant en leverancier).....	12
Gegevens fabrikant	12
Gegevens leverancier/dealer.....	12
Bijlage II (wettelijke verplichte verklaringen)	13

Voorwoord

De indeling van de handleiding is opgesteld conform NEN 5509: 2016.
Dit is een oorspronkelijke gebruikershandleiding in de Nederlandse taal.

Doel van de gebruikershandleiding

Deze gebruikershandleiding voorziet in de aanwijzingen voor:

- Installatie
- Montage
- Doelgroep
- Eisen aan gebruikers
- Aanwijzingen voor veilig gebruik
- Te nemen voorzorgsmaatregelen
- Einde Levenscyclus

Belangrijke informatie

Met de door u aangekochte aankleedtafel 2.0 van Backshop bent u in het bezit gekomen van een uiterst gebruikersvriendelijk, veelzijdig en flexibel product.

Al jaren is vanuit de ergonomie bekend dat bewegen en het hebben van een juiste houding van groot belang zijn om gezondheidsklachten te voorkomen.

Dankzij de toegepaste, hoogwaardige techniek van de aankleedtafel 2.0, wordt een einde gemaakt aan bewegingsarmoede en aan eenzijdige en onjuiste houdingen. Bewegen en variëren tijdens het werk stimuleert het lichaam en geeft nieuwe energie.

Door één druk op de knop wordt het tafel- of werkblad binnen enkele seconden op de gewenste hoogte gebracht. Door deze snelle hoogteverstelling is het mogelijk eenvoudig te wisselen tussen zittend en staand werken. Hierdoor kan de tafel tevens moeiteloos als wissel (flex) plek gehanteerd worden. Door de handige en handzame bediening is het eveneens goed mogelijk baby's en kinderen op verantwoorde wijze te verschonen, te verkleeden en te verzorgen.

Het grote hefvermogen zorgt ervoor dat de tafel moeiteloos apparatuur e.d. op de gewenste hoogte kan brengen, zodat eenieder in staat is, ongeacht de lichaams-lengte, op een comfortabele, efficiënte en ergonomisch, verantwoorde wijze te werken.

Door het gebruik van de instelmogelijkheden van de aankleedtafel 2.0 wordt optimaal aandacht besteed aan de natuurlijke behoefte van het lichaam om te bewegen. Hand-, arm-, nek- en rugklachten, hoofdpijn, concentratieverlies en een snellere vermoeidheid, zullen zich minder snel aandienen of zelfs tot het verleden behoren. Gebleken is dat door een regelmatige verandering van werkhouding en het gebruik van de juiste hulpmiddelen, de motivatie, creativiteit en productiviteit worden bevorderd.

Inleiding

Omschrijving

Het is van belang de gebruiksaanwijzing bij de aankleedtafel 2.0 beschikbaar te hebben en deze zorgvuldig te bewaren. Als gebruiker dient u omtrent het juiste gebruik van de tafel te worden geïnformeerd en moet deze gebruiksaanwijzing om die reden voorhanden zijn. Verkeerd gebruik en het niet opvolgen van de gebruiksinstructies kan niet alleen materiële schade veroorzaken, maar ook gevaarlijke situaties opleveren voor medewerkers en derden. Hiervoor is de leverancier niet aansprakelijk en zijn de gevolgen van de gezondheids- en materiële schade voor rekening van de gebruiker.

In deze gebruiksaanwijzing worden alle functies en instellingen van de aankleedtafel 2.0 stap voor stap aangegeven, met speciale aandacht voor de belangrijkste onderdelen en onderwerpen, zoals o.a. de veiligheid. Het is erg belangrijk hiervan kennis te nemen en er rekening mee te houden tijdens het gebruik. Door de veiligheid in acht te nemen kunnen ongevallen worden voorkomen en storingen en beschadigingen vermeden.

Het is van belang goed nota te nemen van de op de tafel aangebrachte waarschuwingssymbolen en deze niet te verwijderen of onleesbaar te maken.



Alléén indien u goed kennis hebt genomen van alle aanwijzingen, verwijzingen en aandachtspunten, is verantwoord werken mogelijk. Als er in de instructies en informatie onduidelijkheden staan vermeld, neemt u dan, voordat u met de tafel aan de slag gaat, contact op met onze serviceafdeling.

Beoogd gebruik van het product

De aankleedtafel 2.0 is bedoeld voor het aankleden/verschonen van baby's en peuters.

Wijzigingen aan het product

Elke wijziging aan het product of machine kan gevolgen hebben voor veiligheid en garantie. Voor elke wijziging zal een risico-inventarisatie moeten worden uitgevoerd om het gevolg voor veilig gebruik na de wijziging te kunnen beoordelen.

Wijzigingen die niet zijn uitgevoerd door de fabrikant hebben invloed op de garantie en aansprakelijkheid van de fabrikant.

Productspecificaties

Afmetingen werkblad	900x700x18 t/m 1200x700x18mm (l x b x h)
Netspanning	230 V / 50 hz
Werk snelheid	700 W
Snoerlengte	ca. 3 m
Stuurstroomspanning	24 V
Maximale belasting	60 kg

Gebruiksomstandigheden

Temperatuur	kamertemperatuur
Luchtvochtigheid	maximaal 85%

Afbeeldingen van het product



Eisen aan de (werk)plek of omgeving waar het product wordt gebruikt

Schone en gladde ondergrond.

De aankleedtafel mag alleen in een spatdichte ruimte worden gebruikt.

Veiligheid

Veiligheidsrisico's bij verkeerd gebruik

Mechanische risico's: kantelen bij het verrijdbare model.

Reparaties aan de aankleedtafel 2.0 mogen niet door de gebruiker worden uitgevoerd

Onderdelen van de aankleedtafel 2.0 mogen alléén door de leverancier worden vervangen. Bij het monteren van niet originele onderdelen door de gebruiker en/of verkeerde montage vervalt de garantie van de leverancier. Tevens zal alle aansprakelijkheid tegen de leverancier komen te vervallen.

Veiligheidsvoorzieningen

De volgende voorzieningen zijn op de machine aangebracht:

- Afscherming van de elektrische aansluitingen
- Afscherming van bewegende delen

Veiligheidsaanwijzingen

- ⚠ De aankleedtafel 2.0 op een vlakke en stabiele ondergrond plaatsen.
- ⚠ Monteer het wandmontage-frame tegen een vlakke wand.
- ⚠ Gebruik bij wandmontage bevestigingsmateriaal dat overeenstemt met het tafelgewicht en de wandconstructie.
- ⚠ Plaats of monteer iedere zijde van de tafel (blad en frame) op minimaal 25 mm van andere meubels of objecten in de ruimte (veiligheidsafstand).
- ⚠ Let in het bijzonder op, dat bij het naar beneden gaan van het werkblad, zich geen voorwerpen onder het blad bevinden.
- ⚠ Til de tafel bij het verplaatsen nooit aan het werkblad op, maar alléén aan de onderkant van het frame.
- ⚠ Belast het werkblad nooit zwaarder dan aangegeven in de technische specificaties.
- ⚠ Leg de voedingskabel (220V) zodanig aan, dat deze niet bekneld raakt en probleemloos omhoog en omlaag met het werkblad kan worden meebewogen.
- ⚠ Let er op, dat de kabel tijdens het omhoog en omlaag gaan van het werkblad niet kan beschadigen en de kabel niet over scherpe randen ligt.
- ⚠ Voorkom dat de voedingskabel zodanig is aangelegd dat hierdoor struikelgevaar wordt veroorzaakt.
- ⚠ Indien de spanning van de tafel wordt uitgeschakeld, dient er niet aan de voedingskabel getrokken te worden. Voor het uitschakelen van de stroomtoevoer, moet de stekker volledig uit het stopcontact worden gehaald.
- ⚠ De tafel (werkblad) en voedingskabel (snoer) niet in aanraking laten komen met hete oppervlakken en/of open vuur.
- ⚠ Indien zich storingen voordoen tijdens het gebruik van de tafel, zoals rook, stank of een vreemd geluid, stop dan de bediening en verbreek de elektrische voeding (stekker uit het stopcontact).
- ⚠ Bij de verstelbare aankleedtafel 2.0 de bediening van de hoog-laag verstelling nooit gebruiken vóórdat de wielen zijn geblokkeerd.
- ⚠ Veranderingen aanbrengen aan de sturing en/of bediening van de aankleedtafel 2.0 evenals het ombouwen is niet toegestaan.
- ⚠ Plaats de aankleedtafel 2.0 alléén in een brand-, explosie- en plens dichte ruimte.
- ⚠ Tijdens het aansluiten en loskoppelen van het bedieningspaneel dient de aankleedtafel 2.0 spanningsvrij te zijn (stekker uit het stopcontact).
- ⚠ Volgens elektrotechnische voorschriften dient men bij het installeren rekening te houden met de volgende uitgangspunten:
 - Geen langer snoer gebruiken dan 2 meter tussen tafel en stopcontact.
 - De hoog - laag verstelling van de tafel niet langer dan 20 seconde zonder onderbreking laten werken.

Transport en opslag

Transport

Bij ontvangst dient men eerst te controleren of geen beschadigingen tijdens het transport hebben plaatsgevonden aan de aankleedtafel.

Is dit het geval dan mag volgens de gebruiksaanwijzing, met in achtneming van de instructies en veiligheidsvoorschriften, de tafel in gebruik worden genomen.

Worden er transport of materiaalbeschadigingen geconstateerd, dan dient u onze serviceafdeling hierover te informeren.

Opslagcondities

Binnen met normale opslagfaciliteiten.

Methoden die voorkomen dat het product schade oploopt

- Verpakking
- Bescherming tegen schokken

Montage en installatie wandmodel aankleedtafel

Plaatsen

Het plaatsen van het wandmodel aankleedtafel 2.0 geschiedt door medewerkers van De Backshop. Deze zal pas geplaatst worden nadat het wandframe gemonteerd is aan de wand. Het monteren van het wandframe wordt niet gedaan door medewerkers van de Backshop.

Voorwaarden voor montage en bevestiging

Gladde vloeroppervlakte.

In bedrijf stellen van de aankleedtafel

Verwijderen van beschermingsvoorzieningen

Folie, strips, beugels etc.

Deze procedures doen wij voor dat de tafel wordt geleverd.

Procedures

- Instellen
- Proefdraaien
- Testen
- Metingen
- Vastleggen meetresultaten

Bediening

Radiofrequentie-technologische afstandsbediening

Met de knoppen omhoog ↑ en omlaag ↓ kunt u de tafel verstellen.



Belangrijk: Het werkblad stopt automatisch indien het werkblad of de bladsteunen worden gehinderd (geblokkeerd) in de neerwaartse beweging. Dit is het zgn. piëzo systeem.

Instructie herstellen blokkering

Indien de verstelling van het werkblad niet mogelijk is vanwege blokkering, een ingeschakelde beveiliging of om andere redenen, dan moet vanwege de bij de fabricage geprogrammeerde fabrieksinstelling, de volgende handeling worden verricht:

- verwijder alle obstakels die het werkblad in zijn beweging kunnen hinderen;
- verwijder de netvoedingsstekker 220V. uit de tafel of het stopcontact en sluit deze pas na 20 minuten weer aan;

 Plaats het werkblad met  naar de laagste positie

Het werkblad zal met een halve snelheid omlaaggaan. Het is niet mogelijk het werkblad omhoog te brengen. Pas als het werkblad zich in de laagste positie heeft bevonden, is de opwaartse richting weer mogelijk. De fabrieksinstelling wordt dan pas geactiveerd!

Onderhoud

Het werkblad, onderstel en kabels alléén met een droge doek reinigen of indien noodzakelijk met een licht vochtige doek en een niet agressief reinigingsmiddel. Gedurende het reinigen van de donortafel de netspanning uitschakelen door de stekker uit het stopcontact te verwijderen.

Storingen

Oorzaken zoeken en oplossen.

Storing	Oorzaak	Oplossing
De hoogte instelling van het werkblad werkt niet	Stekker netvoeding (220V) niet of niet goed in stopcontact.	220V netvoeding stekker insteken, resp. in stopcontact.
Zie boven	Bedieningspaneel is defect	Neem contact op met onze serviceafdeling
Zie boven	Storing door ontbreken van netspanning 220V	Neem contact op met de technische of huishoudelijke dienst
Zie boven	Werkblad is tijdens het zakken gestopt door een obstakel onder blad. De beveiliging is ingeschakeld.	Obstakel verwijderen en instructie volgen blokkering
Abnormaal geluid tijdens bediening	Defecte motor	Neem contact op met onze serviceafdeling
Abnormaal geluid tijdens bediening	Geleidingsmechanisme niet goed geplaatst	Neem contact op met onze serviceafdeling

Garantie

De Backshop geeft gedurende twee (2) jaar, gerekend vanaf de afleveringsdatum, garantie op alle reparatiekosten en de te vervangen onderdelen aan de aankleedtafel 2.0.

Deze garantie is alléén van toepassing indien sprake is van normaal gebruik van de aankleedtafel 2.0 volgens de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing van de aankleedtafel 2.0, waaronder de veiligheidsaanwijzingen.

Deze garantie is niet van toepassing, indien door niet deskundige personen aan de tafel reparaties zijn uitgevoerd of onderdelen zijn vervangen, welke niet voldoen aan de fabrieksspecificaties.

Deze garantie is eveneens niet van toepassing indien zonder overleg met de leverancier modificaties aan de aankleedtafel 2.0 zijn aangebracht of indien tijdens oneigenlijk gebruik van de aankleedtafel 2.0 schade is veroorzaakt aan de tafel of onderdelen daarvan of aan goederen in de directe nabijheid.

Milieuvoorschriften

Op de aankleedtafel 2.0 zijn de Nederlandse milieuvoorschriften van toepassing. Bij de productie van de tafel is rekening gehouden met het toepassen van de voor het milieu minst belastende materialen en apparaten.

Einde levenscyclus

Afkoppelen van energiebronnen

Haal de stekker uit het stopcontact.

Een oude en afgeschreven aankleedtafel 2.0 dient onbruikbaar te worden gemaakt en de elektrische voedingskabel dient te worden afgeknipt. De tafel dient aan een gecertificeerd recyclebedrijf aangeboden worden.

Bijlage I (gegevens fabrikant en leverancier)

Gegevens fabrikant

Naam : De Ergoshop
Adres : Baileybrugweg 7
Plaats : 4941 TB Raamsdonksveer
Telefoon : +31 (0)10 470 26 11
Website : www.backshop.nl

Gegevens leverancier/dealer

Naam : Backshop BV
Adres : Baileybrugweg 7
Plaats : 4941 TB Raamsdonksveer
Telefoon : +31 (0)10 470 26 11
Website : www.backshop.nl

Bijlage II (wettelijke verplichte verklaringen)

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING BETREFFENDE MACHINES

Verklaring volgens Richtlijn 2006/42/EG, zoals laatstelijk gewijzigd (hierna Machinerichtlijn genoemd). Deze Nederlandse versie van de verklaring is door de fabrikant geverifieerd (oorspronkelijke verklaring).

Wij (fabrikant):

Firmanaam: De Ergoshop
Adres: Pallasstraat 52, 5048 CJ Tilburg
Land: Nederland

verklaren voor het hieronder beschreven product:

Generieke benaming:
Handelsbenaming: Aankleedtafel
Model: 2.0
Type: 2020
Functie: Werken op een werkblad met verstelbare hoogte

dat aan alle toepasselijke bepalingen van de Machinerichtlijn wordt voldaan;
dat de volgende geharmoniseerde normen zijn gehanteerd:

- **EN ISO 12100:2010** | Veiligheid van machines — Basisbegrippen voor ontwerp — Risicobeoordeling en risicoreductie [ISO 12100:2010]
- **EN-ISO 13857:2019** | Veiligheid van machines - Veiligheidsafstanden ter voorkoming van het bereiken van gevaarlijke zones door bovenste en onderste ledematen
- **NEN 5509:2016** | Gebruikershandleidingen

en dat voor het samenstellen van het technisch dossier de volgende in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon is gemachtigd:

Firmanaam: De Ergoshop
Naam en positie: Carola Builtjes, Eigenaar
Adres: Pallasstraat 52, 5048 CJ Tilburg
Land: Nederland

Gedaan te Tilburg, 1 oktober 2021.

Carola Builtjes
Eigenaar, De Ergoshop